

## ¿QUÉ ES PHOVIA Y CUÁLES SON SU BENEFICIOS?

Phovia es una nueva y revolucionaria solución para los problemas de piel de las mascotas.

Consta de una lámpara específicamente diseñada para mascotas con la que se que ilumina un gel que se aplica sobre la piel dañada.

2mn



Dos sesiones de 2 minutos consecutivas una vez a la semana (o una sesión de dos minutos, dos veces por semana), **acelerará drásticamente la regeneración natural de la piel.**



Los estudios han demostrado científicamente que la energía lumínica FLE reduce el tiempo que tarda la piel en recuperarse.

Resultando en una reducción del tiempo de tratamiento de la piel afectada.

## CONTACTO

¿Quieres saber más sobre Phovia?  
¡Su veterinario tiene las respuestas!



# PHOVIA

Innovando en  
dermatología  
veterinaria,  
de Vetoquinol

Para más información  
visite nuestra web:  
[www.phovia.es](http://www.phovia.es)

### Referencias:

Ferroni L., et al. (2020), Marchegiani A., et al. (2019), Salvaggio A., et al. (2020), Marchegiani A., Spaterna A., et al. (2021), Marchegiani A., Fruganti A., et al. (2021), Marchegiani A., et al. (2018), Apostolopoulos N., Mayer U., (2020), Marchegiani A., et al. (2020).



# PHOVIA

Reparación cutánea por estimulación lumínica

terapia por energía  
lumínica FLE\*

un nuevo  
tratamiento  
para la piel de  
su mascota



\*FLE = fluorescent light energy

AHORA DISPONIBLE EN  
SU CENTRO VETERINARIO

## ¿CÓMO FUNCIONA?

## PREGUNTAS FRECUENTES

La **energía lumínica FLE** penetra a través de la piel y actúa sobre las diferentes capas a la vez, acelerando los procesos naturales de reparación. Los estudios realizados han puesto de manifiesto que la **energía lumínica FLE**:

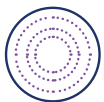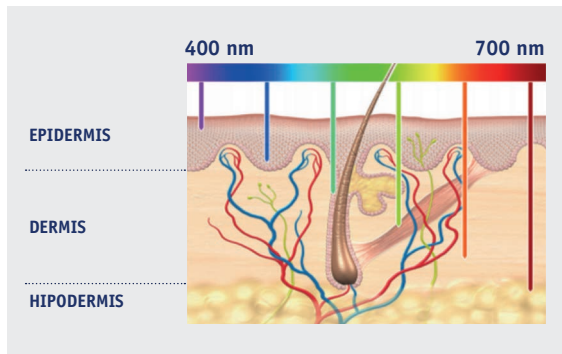

*reduce*  
la inflamación



*acelera*  
la reparación celular



*potencia*  
la inmunidad local



*incrementa*  
la producción de energía



*mejora*  
el aporte sanguíneo

### SIGUE SIEMPRE LAS INDICACIONES DE TU VETERINARIO, CADA CASO ES ÚNICO Y EL TRATAMIENTO ES PERSONALIZADO.

Los siguientes puntos quizás sean de ayuda para resolver algunas de las dudas más frecuentes:

#### 1. ¿Puedo bañar a mi mascota?

Únicamente baña a tu mascota si tu veterinario te lo indica y siempre utilizando los productos por él recomendados.

#### 2. ¿Debo limpiar o aplicar algún producto en la zona tratada?

En caso de ser requerido tu veterinario te indicará qué, cómo y con qué frecuencia. No siempre es necesario, cada caso es diferente.

#### 3. ¿Se puede chupar/lamer la zona afectada?

Evita, siempre que sea posible, que tu mascota se lama la zona de piel afectada. Si hay algún resto de gel **Phovia** en la zona tratada y el perro lo lame, no te preocupes, no es perjudicial para su salud.

#### 4. ¿Le puede dar el sol a la zona en tratamiento?

No hay ningún problema en que a la zona en tratamiento le dé el sol durante los paseos. Como ocurre con las personas, evita exposiciones prolongadas al sol en las horas de mayor calor.



#### 5. ¿Es necesario vendar/cubrir la zona de piel en tratamiento?

Tu veterinario te indicará si es necesario.

#### 6. ¿Cuánto tiempo es necesario para ver una mejora en la piel?

Dependerá del caso y del animal, pero normalmente las mejoras se ven tras 1-2 sesiones iniciales.

#### 7. Otros tratamientos:

En ciertos casos tu veterinario combinará **Phovia** junto con otros tratamientos.

Es muy importante que sigas sus indicaciones y protocolos prescritos para asegurar la recuperación más rápida de tu mascota.

Aunque parezca que la lesión ha curado, no pares los tratamientos si te han indicado que los continúes.